



Qualitäts-Management
Wir sind zertifiziert

Regelmäßige freiwillige Überwachung
nach DIN EN ISO 9001



Medizintechnik &
Sanitätshaus

Medizinischer Fachhandel
Prüfungen und Reparaturen



Muttermilch-Pasteurierer S90 ECO & S180 ECO



Art.-Nr.: S90 Muttermilch-Pasteurierer (9 Liter)



Art.-Nr.: S180 Muttermilch-Pasteurierer (18 Liter)

PASTEURISIERUNG FÜR GESPENDETE MUTTERMILCH

ermöglicht die Beibehaltung immunologischer Faktoren, die andernfalls bei einer hohen Hitzebehandlung zerstört worden wären.

Darüber hinaus ist bekannt, dass so ebenfalls das HI-Virus (Aids) eliminiert wird. Der Pasteurierer entspricht den Leitlinien für Einrichtung und Betrieb von Frauenmilchbanken des UK National Health Service, Royal College of Paediatrics and Child Health. Dabei im besonderen die Anforderungen zur Schnellkühlung, definiert als der Temperaturabfall auf 25°C in weniger als 10 Minuten mit einer sich daraus ergebenden Temperatur von < 10°C innerhalb des Pasteurisierungszyklus, die dementsprechend validiert wurden. Dieses muss vor Übergang in die Kühlanlage erreicht werden.

Der S90 TES/S180 TES stellt die neueste Generation an Pasteurierer für die Säuglingsnahrung dar. Er wurde durch Mitarbeit von Professor J. D. Baum erfunden und von DJ Colgate entwickelt unter Einsatz wertvoller Beiträge von Neonatologen, Mikrobiologen und Ernährungswissenschaftlern, die seit den frühen 80er Jahren eine unaufhörliche Forschungsarbeit und Entwicklung durchgemacht haben. Neue Leistungsmerkmale sind u. a.: Anzeige der Milch- und nicht der Wasserbadtemperatur während des gesamten Zyklus. Jetzt können in demselben Zyklus unterschiedliche Flaschengrößen (130 ml und 250 ml) pasteurisiert werden.

Ein standardmäßiges, separates Flaschenwärmesystem sowie ein ferngesteuertes, kabelloses Protokolliertsystem stehen ebenfalls zur Verfügung. Pasteurierer werden in Kinderkrankenhäusern, Fachabteilungen und zentralen Frauenmilchbanken in Großbritannien, Europa und weltweit eingesetzt.

Verfahrensprüfung: Der Sterifeed Datenlogger benötigt keine direkte Verbindung zu einem PC. Die Messwerte werden pro Minute erfasst, wobei die genaue Temperatur der Milch, die Uhrzeit und das Datum aufgezeichnet werden. Diese Informationen werden in die mitgelieferten Software heruntergeladen, um von der zufriedenstellenden Behandlung jeder Charge eine dauerhafte Aufzeichnung zu erhalten, die dann entweder als grafische Darstellung oder in Listenformat ausgedruckt werden kann, um jederzeit einen Behandlungsnachweis erbringen zu können.

Flaschen: Zum Gebrauch mit diesem Gerät wird die glatthalsige, klare Flaschenreihe von Sterifeed mit integrierter Dichtungsscheibe oder Induktionsversiegelung empfohlen. Diese Flaschen sind für den Einmalgebrauch vorsterilisiert, können aber nach Reinigung mit einem Geschirrspüler mit Desinfektionszyklus wieder verwendet werden. In diesem Gerät können weitere Flaschengrößen bis zu einem Volumen von 1 Liter eingesetzt werden.

SORGEN FÜR IHR BABY



GET-Medizintechnik-Handel e.K. - Dekan-Schmid-Str. 11 - 89264 Weißenhorn

Tel. +49 (0) 7309-9275017 - E-Mail: info@get-medizintechnik.de - Web: www.get-medizintechnik.de